



ワンズケア®トイレ処理袋 レギュラー



30 枚入
品番: YS-290
5,115円 (税抜4,650円)

商品サイズ: 幅550×高さ420mm
パッケージサイズ: 幅280×高さ310×厚さ120mm
パッケージ重量: 1.8kg

ワンズケア®トイレ処理袋 長時間用



20 枚入
品番: YS-292
4,180円 (税抜3,800円)

商品サイズ: 幅550×高さ470mm
パッケージサイズ: 幅280×高さ310×厚さ85mm
パッケージ重量: 1.3kg

ワンズケア®トイレ処理袋 介護・防災 兼用



20 枚入
品番: YS-127
3,850円 (税抜3,500円)

商品サイズ: 幅650×高さ550mm
パッケージサイズ: 幅320×高さ280×厚さ85mm
パッケージ重量: 1.3kg



240 枚入
品番: YS-240
オープン価格

商品サイズ: 幅650×高さ550mm
梱包サイズ: 幅550×奥行325×高さ520mm
梱包重量: 15.6kg

導尿バッグ用カバー II



クラボウ
EBRIQ
抗菌・消臭

品番: YD-271

4,620円 (税抜4,200円)

商品サイズ: 幅約400×高さ約340mm
パッケージ重量: 114g

腰上げしないで 使用出来る差込便器 **らくらくクリーン**



スリム
タイプ

品番: YC-251

13,310円 (税抜12,100円)

幅: 165mm 受口幅: 85mm 奥行: 355mm
全高: 258mm 内容量: 1,000ml 重量: 520g




ワイド
タイプ

品番: YC-250

14,520円 (税抜13,200円)

幅: 175mm 受口幅: 140mm 奥行: 355mm
全高: 250mm 内容量: 1,100ml 重量: 560g

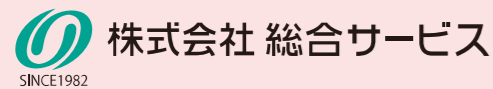

お客様相談室 0120-980-329

受付時間: 土・日・祝を除く 9:30~17:00

<https://sservice.co.jp/>

〒103-0027 東京都中央区日本橋3-14-5

●カタログ中の商品の色は印刷物ですので、実際の色とは異なる場合があります。
●商品改良等のため、仕様・外観は予告なく変更される場合があります。

特許・実用新案登録済

日本製



職員・利用者・患者の尊厳を守る 排泄ケアのご提案です

毎日の生活の
さまざまなシーンで、
弊社製品が
活躍します

排泄は人間であれば、誰もが毎日行う生理現象です。
しかし、入院・入所される方は自立して排泄行為ができない方もいらっしゃいます。
そういう方は職員による介助が必要になり、トイレへの誘導の介助、歩行が不安定な方はポータブルトイレの利用、差し込み便器や尿器の利用が想定されます。
用具を用いた排泄を行うと、用具に残った排泄物の処理・洗浄が必要です。
職員さんであれば、業務といえど、時間・肉体的・精神的負担が大きく、患者さんであれば、申し訳ないといった気持ちが湧いてくる方もいらっしゃいます。
デリケートな排泄ケアの問題点を解決し、関係者皆様の尊厳を守る商品をご提案させていただきます。



ワンズケアトイレ処理袋 シリーズ

レギュラー



ポータブルトイレの後処理や感染対策として!

P6

長時間用



P7


介護・防災兼用



後処理軽減・感染対策・災害時トイレに!

P12

導尿バッグ用カバー II

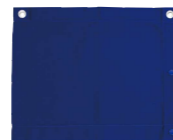

消臭・抗菌効果の優れたカバーです!

P14

らくらくクリーン



ベッドでおむつ以外で排泄したい方などに!

P15

01 ワンズケア®トイレ処理袋 シリーズ



ポータブルトイレの受バケツの
バケツ処理を変えてみませんか?



ポータブルトイレ使用時のお悩み

- 排泄時のバケツ処理に時間がかかる…
- 排泄物からの感染が不安で、できればバケツを触りたくない…
- ポータブルトイレの受バケツにニオイがついてしまう…
- ポータブルトイレから洗浄場所まで遠く、待ち運びが大変…
- ベッドパンウォッシャーでバケツを洗うと他の尿器などが洗えず、溜まってしまう



処理袋使用の
メリット


- 1 ポータブルトイレの受バケツからの2次感染リスクを低減
- 2 洗浄時間の削減による、業務効率化
- 3 職員様の肉体的・精神的負担を低減

01 ワンズケア®トイレ処理袋 シリーズ

特長

ミシン目から切り取って
結びひもになります

ヒートシール
〈尿だまり防止加工〉
袋の両端に尿がたまりません

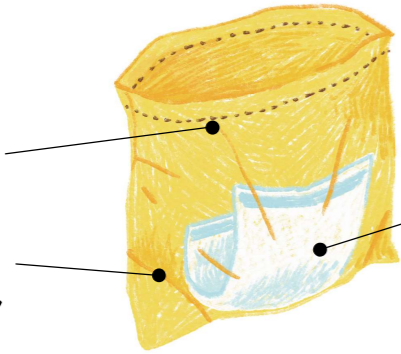


ポリマーが水分を吸収

不織布

消臭・抗菌
ポリマー

不織布

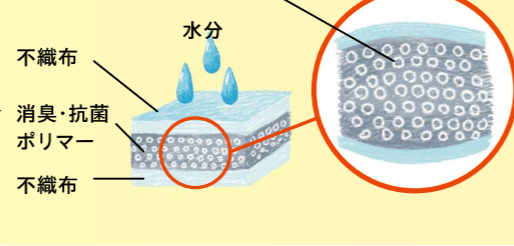

排泄ケアの作業時間 比較

作業時間が約**83%**削減!!

	バケツに水を張る場合 (1日2回ポータブルトイレのケア)	ワンズケア®トイレ処理袋を使用した場合
作業時間	1回 約15分×2回 = 約30分/1日 1ヶ月で約 15時間	1日1枚使用 約5分/1日 1ヶ月で わずか 2時間半

※自社調査データより ※袋の種類により、尿量の回数制限があります

ご使用方法


ご使用方法はとても簡単。排泄後のバケツを洗う手間が省けます。



※自治体のゴミ収集方式により異なる場合がございます

ワンズケア®トイレ処理袋 シリーズの優れた 抗菌性

いずれの菌に対しても優れた初期抗菌効果、および抗菌性維持効果が証明されています。アンモニア産生菌に対する抗菌効果が高いことから尿素の分解を抑えることができ、アンモニアに対する消臭効果が期待できます。

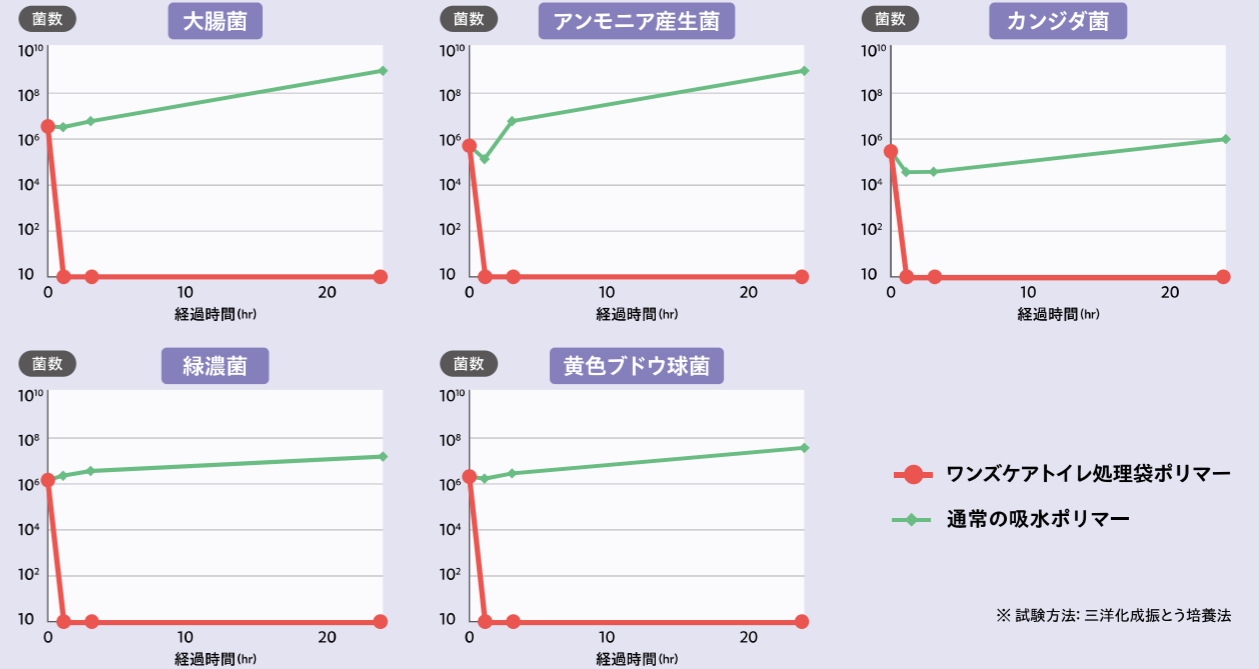

ワンズケア®トイレ処理袋 シリーズの優れた 消臭性


消臭剤を併用しなくても優れた消臭効果、および消臭維持効果が証明されています。
2時間経過後はほとんど臭いを感じないレベルになり、持続しています。

測定方法

- 人口尿(アンモニア入り)150mlをシート吸収させ、縦30cm×横46cm×高さ22cmのケースをシートの上に被せる。
- ケース内に検知管を挿入し、時間ごとにケース内のアンモニア濃度を計測した。

測定結果

	ワンズケア トイレ処理袋シート	シートなし
0分	1800	1800
5分	550	1800
15分	290	1800
30分	210	1800
60分	110	1800
2時間	80	1600
10時間	30	1200
18時間	20	980
24時間	13	840

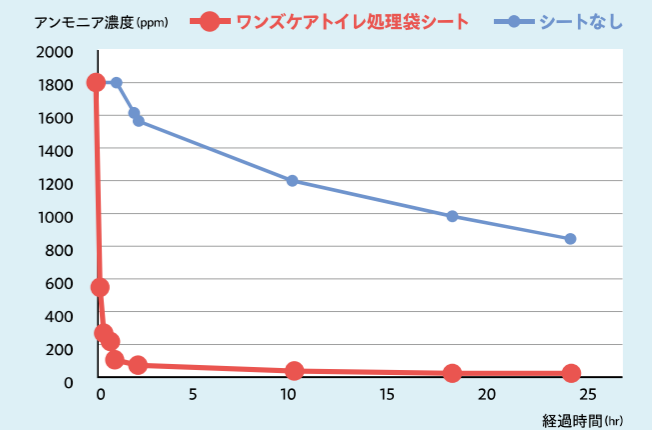

アンモニア濃度 (ppm) 参考 0~100ppm: ほとんど臭わない 100~500ppm: 少し臭う 500~1000ppm: 不快な臭い 1000ppm以上: 刺激臭



ポータブルトイレ用

負担軽減(時間・手間・コスト)・感染対策



QRコード情報
トイレ処理袋レギュラー

ワンズケア®トイレ処理袋 レギュラー

30
枚入

5,115円(税抜4,650円)

準備も後処理も簡単、気持ちよく使えます



袋の大きさ：幅550×高さ420mm
吸収凝固シート：幅300×長さ500mm
吸水量：水道水で1,200ml(実験値)
1枚重さ：約57g

中身が目立ちにくい
オレンジ色



特長

- 袋と抗菌ポリマー入り吸収凝固シートが一体化し、セットも後処理も簡単
- 袋のサイズがポータブルトイレの受バケツにジャストフィット
- 中身が透けにくいオレンジ色で気持ちよく使える
- 使用後は紙おむつ同様に可燃ゴミとして処理が可能
※自治体のゴミ収集方式により異なる場合がございます
- 白い吸収凝固シートで排泄物の色確認がしやすく、健康状態を把握しやすい
- 抗菌ポリマー入り吸収凝固シートの前面が長く、尿の跳ね返りを防止

吸収回数目安



こんな病院・施設にオススメ

- 排泄物からの感染対策
- 洗浄業務の時短を考えている

ワンズケア®トイレ処理袋
レギュラー

お試しサンプル有り



電話でのお申し込みはこちら
電話 0120-980-329



ポータブルトイレ用

負担軽減(時間・手間・コスト)・感染対策



QRコード情報
トイレ処理袋長時間用

ワンズケア®トイレ処理袋 長時間用


20
枚入

4,180円(税抜3,800円)

吸収量がレギュラータイプより30%アップ



袋の大きさ：幅550×高さ470mm
吸収凝固シート：幅300×長さ500mm
吸水量：水道水で1,500ml(実験値)
1枚重さ：約69.2g

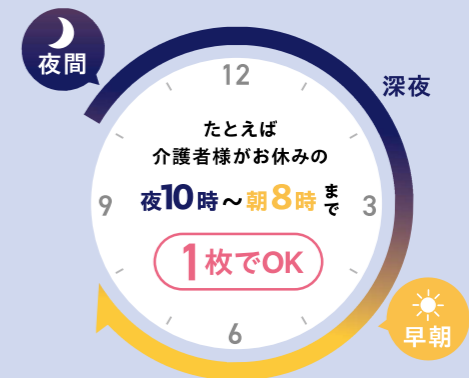


中身が見えにくく、集積所でも
目立たないクリーム色

特長

- シートの吸収量は、従来品「ワンズケア®トイレ処理袋レギュラー」より30%アップ
- 袋と抗菌ポリマー入り吸収凝固シートが一体化し、セットも後処理も簡単
- 袋のサイズは「ワンズケア®トイレ処理袋レギュラー」より少し大きめで処理時に手を汚さない
- 使用後は紙おむつ同様に可燃ゴミとして処理が可能
※自治体のゴミ収集方式により異なる場合がございます
- 白い吸収シートで排泄物の色確認がしやすく、健康状態を把握しやすい
- 抗菌ポリマー入り吸収凝固シートの前面が長く、尿の跳ね返りを防止

吸収回数目安

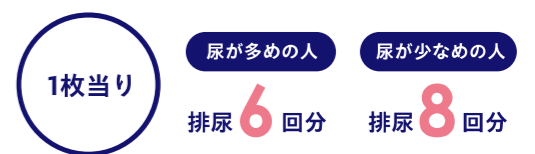

こんな病院・施設にオススメ

- 感染した患者様と接触機会を減らしたい
- 尿量・回数が多い方
- 病院・施設の手薄な夜間帯に

ワンズケア®トイレ処理袋
長時間用

お試しサンプル有り




電話でのお申し込みはこちら
電話 0120-980-329

ポータブルトイレや差込便器の排泄物を

手洗い時に比べ、業務負担を削減!

さっと片付け感染リスクを低減!

ベッドパンウォッシャー

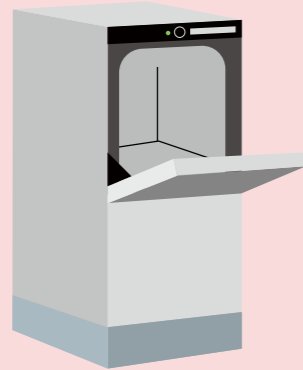

手洗い



トイレ処理袋がない場合のポータブルトイレの処理

- ① 受バケツに水を張り、消臭液(シート等)を入れる
- ② 排泄後にバケツを持ってトイレに流す
- ③ バケツを洗って水を入れ再度ポータブルトイレに設置

トイレ処理袋
ワンズケアレギュラー




作業時間の短縮!

1ヶ月で約**13**時間短縮*

※これまでのバケツ洗い: 約15時間/1ヶ月(1回約15分×2回=約30分/1日)
トイレ処理袋なら約2時間30分/1ヶ月(1日1枚=約5分)

感染リスクの低減も

	感染予防	洗浄時間・業務負担	水道代	電気代	洗剤代	消耗品	感染性廃棄物
ワンズケア レギュラー 	 ディスポなので安心!	 約5分	 不要	 不要	 不要	 1枚	 0.25kg (排便1回 250mL)
ベッドパン ウォッシャー 	 煮沸消毒	 約8~10分	 約18ℓ	 約0.24kWh	 リンス剤6.4mℓ	 消臭剤20mℓ	 不要
手洗い 	 洗い残し・ 飛沫感染のリスク	 約10~15分	 約18ℓ	 不要	 中性洗剤10mℓ 消毒剤25mℓ	 消臭剤20mℓ	 不要

※各種数値 自社調査データより

ワンズケア® トイレ処理袋 シリーズ お客様の



当商品をご利用いただいているお客様に、お話を伺いました。



voice 1

セットも処理も簡単！
病棟に導入したことで
職員の笑顔も増えました

公益財団法人慈圭会
慈圭病院
病棟看護師長
西本 裕美さん



point

洗浄作業にかかる時間が
30分→5分に！

におい残りの
不快感も軽減◎

災害時用の
病院備蓄にもピッタリ

point

使用方法が簡便で
感染症対策に最適！


感染ゴミも
まとめて廃棄

常備しておくことで
緊急時も安心

voice 2

感染症対策で大活躍！
緊急時のために今後も
常備しておきたい。

介護老人保健施設
能見台パトリア
介護福祉士
井上 香菜さん

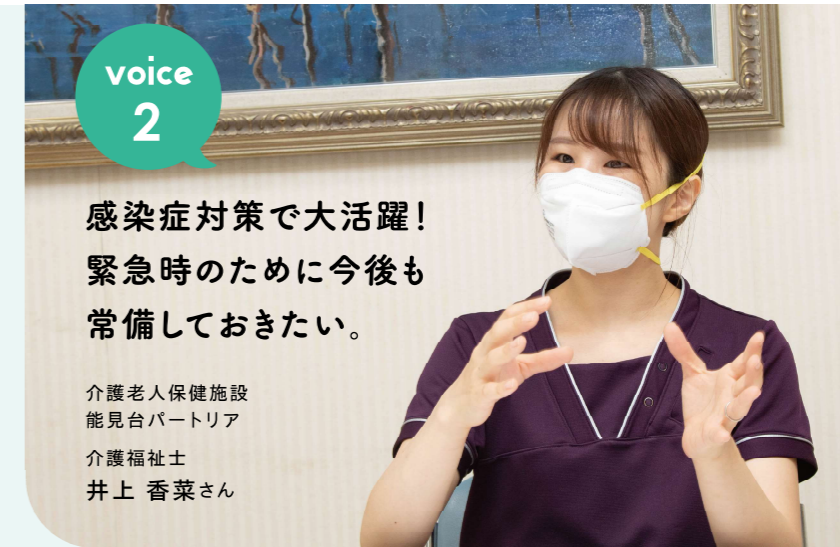

Q 「ワンズケア トイレ処理袋」 導入の経緯は？

2022年1月、私が看護師長を務めていた病棟で初めて、新型コロナウイルス感染症のクラスターが発生しました。しかし病棟のトイレ数は決して多くなく、陽性患者がそれぞれのタイミングでトイレに行くのは困難な状況でした。そこでポータブルトイレを活用することになりました。

計画時、ポータブルトイレは職員が手動で洗浄を行う予定でしたが、防護服を着たまま行う洗浄作業はかなりの重労働でした。なおかつ、感染リスクと隣り合わせという精神的な不安感から、職員たちが疲弊していくのを目の当たりにしていたんです。

そんなときに職員の一人が「ワンズケア トイレ処理袋」をすすめてくれました。自宅の介護でたまたまこの商品を受用していたのだそうです。実際にサンプルを使わせてもらおうと、作業がしやすくて驚きました。

ほかの職員から「今後も使用したい」「導入してほしい」など多くの声が挙がり、院長と総務課にかけあうと、すぐに注文してもらえることになりました。トップ層のスピーディな導入判断は本当にありがたかったです。

Q 導入前には どんな苦労がありましたか？

当院は精神科という側面から、洗浄ス

ペースも含め、常時鍵のかかっている場所が多数あります。つまり、一か所ずつ鍵を操作しなければならないという手間がありました。各病室からポータブルトイレを持って出て、洗浄スペースを解錠してバケツを洗浄、そして再び施錠して戻る。これだけの作業を完了するのに、1回につき5分以上、毎日約10名分がかかっていました。

それだけ工数がかかるとほかのケアに費やす時間が圧迫されてしまうことなどから、どうしてもポータブルトイレ洗浄の回数を減らさざるを得ません。患者さんに迷惑はかけられないし、これ以上職員の負担も増やせない。なんとかしたいと思っていたんです。

Q 実際の活用方法と、 メリットを教えてください。

トイレ処理袋を朝一でセットして、だいたい日中に1~2回、夜に1回交換しています。これまでバケツの洗浄や処理には1人分で1日に30分強の時間がかかっていましたが、トイレ処理袋はポータブルトイレにかぶせるだけで使用でき、使用後は結んで捨てるだけ。1人分1日に5分程度で処理が終わり、かなりの労力削減を実感していました。

一番嬉しかった点は、においの問題が解消されたことです。これまでは使用後すぐに洗浄できないにおいがあったが、

ポータブルトイレ自体を清潔に使えるようになったことにおいなくなり、患者さんの不快感軽減にもつながったと思います。

また袋自体に色がついている点や、使い方がわかりやすいというのも、病棟で活用するのに大変ありがたいポイントでしたね。

使ってみてとても便利だったので、災害時に備えてトイレ処理袋の防災タイプを病院に備蓄する方向で話を進めています。ここ最近では特に豪雨災害などによるライフラインの混乱が懸念されていますが、病院として備えておくことでいざというときに役立つはずですよ。

そして今後もいつか、医療体制に混乱が生じるレベルの特殊事態が起こるかもしれません。現場の第一線で活躍する職員の心理的負担を軽減するためにも、「ワンズケア トイレ処理袋」はこれからも活用していきたいと思っています。



Q 「ワンズケア トイレ処理袋」 導入の経緯は？

新型コロナウイルス感染症が全国的に広がり始め、当施設でも感染対策に力を入れていくことになりました。当施設では以前から、入居者様の状態に合わせて主に夜間にポータブルトイレを使用していました。排泄処理には、家庭用の45リットルのゴミ袋にオムツの取り替え用シートを1つずつセットした、職員の手作りによる処理袋を使用していました。しかし、手作りの処理袋を準備するには1つ当たり10分以上の時間がかかります。クラスターが発生した場合には、夜間だけでなく日中の活動時間帯にもポータブルトイレを準備する作業に職員のリソースが割かれてしまうという問題が考えられました。そこで、感染対策として、より手軽に使用できる「ワンズケア トイレ処理袋」を導入することになりました。

Q 実際の活用事例を 教えてくださいませんか？

通常は手作りの処理袋を使用していますが、クラスターが発生した際は、トイレ処理袋に切り替えました。当施設では感染者

が発生すると、感染されたご利用者は個室隔離(レッドゾーン)となりポータブルトイレを使用していますが、感染拡大を防ぐために、その他の同フロアのご利用者についても、ご自身の居室において一定期間の隔離対応に協力をお願いしています。その結果、全入居者の60名以上がポータブルトイレを使用することになりました。

当時は、使用の度に処理袋を交換し、多くの処理袋が必要になりました。しかし、トイレ処理袋を導入したことで、セッティング時間が数十秒に短縮でき、通常かかるはずの時間と手間を大幅に削減できました。

現在、施設ではクラスターが発生していないため、基本的に共用のトイレを使用いただいています。必要なご利用者にはポータブルトイレを用意することもあります。その際には手作りの処理袋を使用しています。感染対策に追われていた当時は振り返ると、トイレ処理袋には大変助けられたと感じています。

実際の使用時には、口腔ケアに使った水や残ったお茶なども手作りの処理袋に入れて、感染ゴミとしてまとめて廃棄していました。洗い場などで感染リスクのあるもの

を処理するよりも、居室の中で処理する方が感染拡大は防げるため、このような活用方法も有効だと考えています。

Q 使用時に感じたメリットとデメリット があれば教えてください。

最大のメリットは、その簡便さだと思います。トイレ処理袋はポータブルトイレに被せるだけで簡単に使用できるので非常に便利でした。使用後は袋を紐で結んで捨てるだけでトータル作業時間は5分程度です。時間と労力を大幅に削減できました。また、手早く処理ができるのでにおいの問題が最小限に食い止められたと感じます。においを閉じ込めるだけでなく、丈夫な袋で破れる心配がなかった点も嬉しいポイントでした。

デメリットとして挙げられる点は、袋のガサガサ音が比較的大きいことです。夜間にトイレ処理袋を交換する際に、その音で寝ていたご利用者が起きてしまうことがありました。音が出にくい素材であれば、使い勝手がさらに良くなると思います。あとは、コスト面でしょうか。手作りの処理袋よりもコストがかかるため、トイレ処理袋を常用することが困難です。しかし、感染症対策時や災害時の使用には非常に有用だと考えますので、常に在庫を確保して、緊急時には「ワンズケア トイレ処理袋」を活用していきたいと考えています。



災害時における
簡易トイレの重要性



ワンズケア®トイレ処理袋 介護・防災 兼用

洋式便器にも使えるポータブルトイレ処理袋



袋の大きさ：幅650×高さ550mm 1枚重さ：約55g
 吸収凝固シート：幅450×長さ300mm
 吸水量：水道水で1,000ml(実験値)

吸収回数目安

1枚当り 排尿 **1~3** 回分
 ※災害時の衛生面を考慮しての目安回数で、できるだけ1回1枚で交換を推奨。(防災見地)

こんな病院・施設にオススメ
 ● 断水時でもいつものトイレで用を足したい方
 ● 感染対策と災害対策を考えている

- 特長**
- 袋のサイズが大きく、受バケツ処理時に手が汚れにくい
 - ポータブルトイレでの普段使いから、災害時トイレでも使用可
 - ポータブルトイレ・差し込み便器処理時の感染対策として
 - 通常のトイレにも使用できるサイズ




普段は介護利用ができ
ローリングストックも可能

災害時のライフライン寸断時は
洋式便器にも使用できる

通常時や感染症蔓延時は介護でのポータブルトイレの処理で。災害時には職員様を含む災害用トイレとして使用。



ワンズケア®トイレ処理袋 介護・防災 兼用
 お試しサンプル有り
 電話でのお申し込みはこちら
 電話 **0120-980-329**

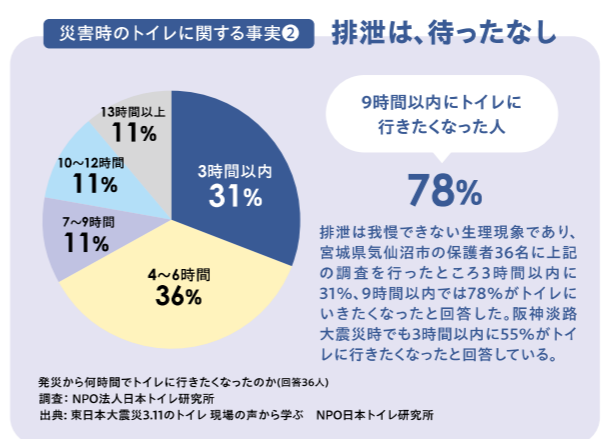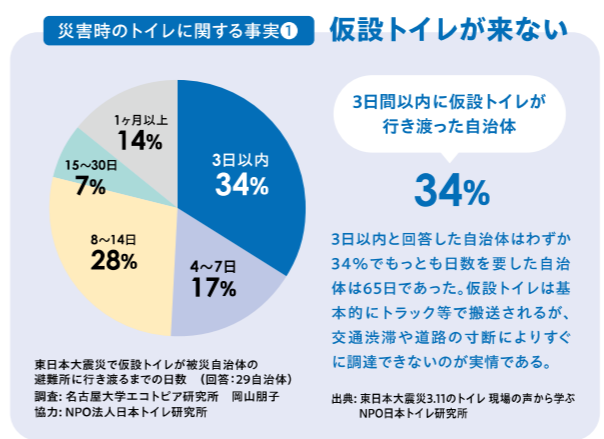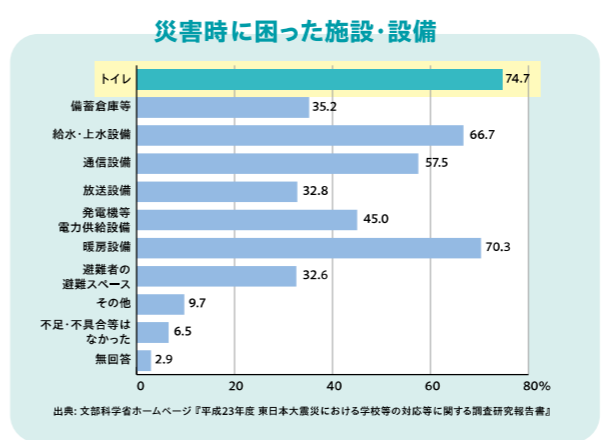


災害時のトイレに関する事実③ トイレ不足から健康を害す

排泄は我慢できない。しかし、水洗トイレは使えない
 仮設トイレの届かない多くの避難所ではトイレが大小便の山になった。このような状況でトイレに行くのが嫌で水分摂取や食事の摂取を控える傾向があった。

衛生環境の悪化から病気を招く
 その結果、体力の低下により感染症にかかりやすくなり脱水症状やエコノミークラス症候群になることも危惧された。急性期を過ぎてても、下痢、発熱、嘔吐、脱水症状などを受診する患者は減らず避難所の評価(トイレの衛生状態のチェックを含む)を余儀なくされた地域もある。

また災害用の仮設トイレは和式トイレやバリアフリー設計されていないものが多くしゃがめない、座れない、段差がある、怖い、汚いといった課題も山積みである。

出典：東日本大震災3.11のトイレ現場の声から学ぶ NPO日本トイレ研究所

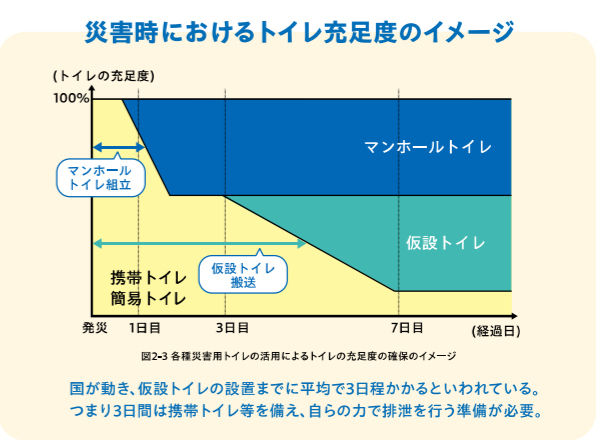

使用方法や商品について
動画で詳しくご確認いただけます



02 排泄ケアをシンプルに、衛生的にサポート
抗菌・消臭の特殊生地で作られた尿バッグ専用カバー

品番：YD-271



クラボウ EBRIQ® 抗菌・消臭 導尿バッグ用カバーⅡ



QRコード情報
導尿バッグ用カバー

院内での
ニオイ及び
感染対策に

抗菌・消臭効果が持続

透けない、臭わない、目立たない！
利用者様のプライバシーと安心をガード

4,620円(税抜4,200円)



ベッドサイド



車椅子

患者様の
プライバシーを
保護

※写真は使用イメージです




尿の状態を
確認しやすい

機能素材イブリック®が細菌の増殖や悪臭を軽減

天然繊維に電子線グラフト重合処理(「クラボウ」EBRIQ®)使用


消臭即効性

アンモニアが
約10分で
約9割以上
減少

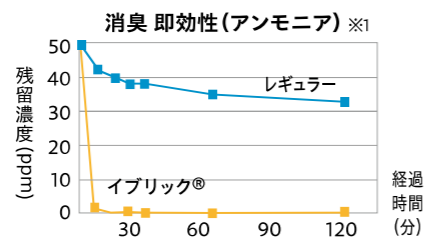


消臭耐久性

100回
洗濯しても
消臭効果が
持続

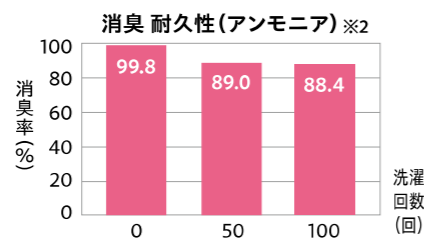

抗菌性

繊維上の黄色ブドウ球菌などに対して
高い抗菌効果があります。

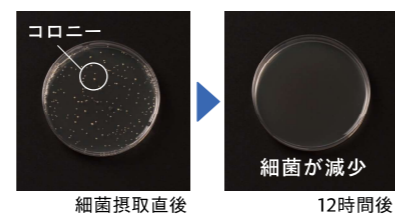

細菌摂取直後
細菌が減少
12時間後

※1・2 [測定方法] 試料重量:生地1g 試験容器:1Lテドラパック
初期濃度:アンモニア50ppm 測定方法:北側式ガス検知管

導尿バッグ用カバーⅡ

デモ商品貸出可

電話でのお申し込みはこちら
電話 0120-980-329

03 排泄ケアをシンプルに、衛生的にサポート
腰上げしないで使用できる差込便器

品番：YC-251(スリム)

品番：YC-250(ワイド)



らくらくクリーン



QRコード情報
らくらくクリーン




スリムタイプ
13,310円(税抜12,100円)

ワイドタイプ
14,520円(税抜13,200円)

差込
便器

治療目的、体力低下などで腰上げができない方が
おむつをしないで排泄できる男女共用の便尿器です

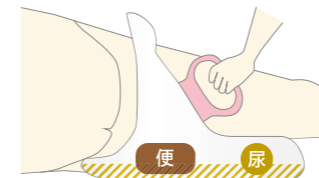

腰(臀部)の骨折などで
腰を上げられない方

股関節が
開きにくい方
スリムタイプ

ベッドで
おむつ以外で
排泄したい方

便意、尿意を伝えられる方が使用できます。

使用方法



動画で使用方法を
ご確認いただけます



用具の先端を上方からマットレスを
押すような形で、臀部をすくい上げる
ように挿入します。



排泄しやすいように掛物をかけ
て、その場を離れます。



排泄後、マットレスに押し付ける
ようにしながら、ゆっくり平行に
引き抜きます。

お客様の声

愛知県 Iさん
(整形外科病棟
看護師 女性)

入院患者様へ使用して
いますが、尾骨骨折患
者の排泄処理が非常
に楽になりました。

千葉県 Cさん
(女性)

整形外科で以前から使
用していましたが、今
では他の病棟でも使用
して看護師から好評です。

状況に合わせて選べる2タイプ



スリムタイプ YC-251

股関節が開きにくい方 尿便兼用 男女兼用



ワイドタイプ YC-250

尿便兼用 男女兼用

※クレゾール系、塩素系薬液消毒可能 ※ベッドパンウォッシャーは使用不可

らくらくクリーン

デモ商品貸出可

電話でのお申し込みはこちら
電話 0120-980-329